

per la prevenzione e il trattamento di cicatrici piane, ipertrofiche e cheloidi

COMPOSIZIONE

POLIURETANO, ALLANTOINA, ESTRATTO DI CIPOLLA, GLICOSAMINOGLICANI, SODIO IALURONATO.

COME SI FORMA UNA CICATRICE

La cicatrice è un tessuto fibroso che si forma per riparare una lesione (patologica o traumatica) ed è dovuta alla proliferazione del derma e dell'epidermide. Le cicatrici di solito si assottigliano e si riducono fisiologicamente, ma se ciò non avviene, permane una cicatrice voluminosa (cicatrice ipertrofica o cheloide). Per prevenire questo spiacevole inconveniente o migliorare l'aspetto delle cicatrici già esistenti, LFM propone Kaloidon Patch®.

INDICAZIONI

Kaloidon Patch® è un cerotto molto sottile e trasparente, a base poliuretanic (materiale molto compatibile con la pelle ed adatto anche a quelle più sensibili), indicato per **prevenire l'insorgenza di cicatrici ipertrofiche e cheloidi o trattare cicatrici ipertrofiche e cheloidi già presenti, di qualsiasi natura esse siano (es. chirurgiche quali taglio cesareo, traumatiche ecc.)**. Kaloidon Patch® combina il meccanismo d'azione legato all'azione meccanica-compressiva che svolge il cerotto sulla cicatrice, ipertrofica o non, con la presenza di componenti, quali allantoina, glicosaminoglicani e acido ialuronico che sono in grado di mantenere l'idratazione e l'elasticità della pelle favorendo nel complesso un rapido ammorbidimento, **appiattimento e riduzione della cicatrice**. L'estratto di cipolla con funzione antiossidante completa la formulazione.

Kaloidon Patch® può essere applicato su cicatrici di recente formazione subito dopo la rimozione dei punti, prevenendo così la formazione di iperplasie cutanee.

In caso di applicazione su cicatrici già formate (ipertrofiche e cheloidi), Kaloidon Patch® è in grado di migliorarne sensibilmente l'aspetto estetico e la funzionalità: la cicatrice diventa più morbida, si riduce lo spessore e si appiana.




Proprio per questi motivi Kaloidon Patch® può essere utilizzato sia su cicatrici recenti prevenendone l'ipertrofia, che su cicatrici ipertrofiche e cheloidi già in essere.

COME USARE KALOIDON PATCH®


DETERSIONE

Detergere la parte da trattare con detergente delicato, possibilmente privo di parabeni e profumi e asciugare tamponando.

APPLICAZIONE CEROTTO - Per applicare il cerotto, rimuovere una delle due parti della carta di protezione a partire da un angolo e procedere delicatamente posizionando man mano la parte adesiva del cerotto sull'area interessata, togliere con la stessa modalità l'altra carta protettiva e fare aderire il cerotto sull'epidermide (vedi disegni sotto).

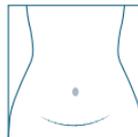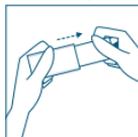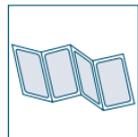

Assicurarsi che la pelle sia pulita e asciutta e che la cicatrice sia completamente coperta dal cerotto. Qualora quest'ultimo non dovesse essere sufficiente per l'intera superficie è possibile applicare un altro cerotto vicino (di fianco). Viceversa, per cicatrici più piccole il cerotto può essere tagliato prima di rimuovere la carta di protezione nella misura desiderata come indicato nel disegno (vedi disegno sotto).

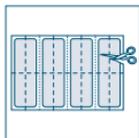

Kaloidon Patch® è adatto per qualsiasi parte del corpo, viso compreso.
Il cerotto va sostituito quotidianamente.

RIMOZIONE CEROTTO

Con una spugnetta imbevuta di acqua tiepida (o un batuffolo di cotone), tamponare la pelle intorno al cerotto, sollevare un lembo dello stesso, bagnando continuamente la zona interessata al distacco e rimuoverlo lentamente.



DURATA DEL TRATTAMENTO

Kaloidon Patch® deve essere applicato e lasciato a contatto con la cicatrice per almeno 12 ore al giorno.

Su cicatrici di recente formazione, si consiglia l'applicazione del cerotto una volta al giorno con sostituzione giornaliera, per almeno 4 settimane consecutive e comunque secondo il parere del medico. Su cicatrici meno recenti, la applicazione consigliata è di una volta al giorno con sostituzione giornaliera, per almeno 8 settimane consecutive e comunque secondo il parere del medico.

I primi risultati sono visibili dopo 3-4 settimane dall'inizio del trattamento. In caso di cicatrici ostinate, si consiglia di proseguire con le applicazioni di Kaloidon Plus per uso topico dopo aver sentito il parere del medico curante.

In generale i risultati possono variare da persona a persona e da cicatrice a cicatrice.

CONTROINDICAZIONI

L'uso di questo dispositivo medico è controindicato nei casi di allergie note o sospette a una qualsiasi delle sostanze contenute nel dispositivo.

AVVERTENZE

Non utilizzare su ferite aperte o in caso di ulcerazioni della cute. Usare con mani pulite. Non usare in contemporanea ad altri prodotti topici.

Non riutilizzare il cerotto già usato, applicare ogni volta (ogni giorno) un nuovo cerotto.

Dopo aver prelevato un cerotto, avere cura di richiudere la zip della busta.

Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo da luce diretta, lontano da fonti di calore e a temperatura non superiore a 30° C.

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usare dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.

Uso esterno. Non disperdere il contenitore dopo l'uso.

Non sono conosciuti effetti avversi al prodotto, si raccomanda comunque di non usare il prodotto se sono note sensibilità verso uno o più componenti.

In caso di effetti indesiderati, interrompere immediatamente il trattamento e riferire al medico o al farmacista.



LFM S.r.l. Via Monterosso 273
21042 Caronno Pertusella (VA) - www.lfm.it



Non riutilizzare



Consultare le istruzioni per l'uso



Non utilizzare se la confezione non è integra



Tenere lontano dalla luce



30°C
Limite superiore di temperatura max 30°C



Codice del lotto



Utilizzare entro la data

